

SENSOR FREESTYLE LIBRE DO MONITOROWANIA GLIKEMII



CENA: **289,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 1 DZIEŃ ROBOCZY

PRODUCENT: ABBOTT

NUMER KATALOGOWY: FLS

OPIS PRZEDMIOTU

SENSOR FREESTYLE LIBRE NOWOCZESNY I WYGODNY SYSTEM MONITOROWANIA I POMIARÓW GLUKOZY DLA DIABETYKA! MONITOROWANIE CUKRZYCY NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWE.

- PRZY ZAMÓWIENIU 3 SZT. SENSORÓW DOSTAWA KRAJOWA GRATIS.
- WYSYŁAMY W OK. 24-48 H ROBOCZYCH.

SENSORY MOŻESZ SKANOWAĆ TELEFONEM LUB POPRZECZ DEDYKOWANY [CZYTNIK FREESTYLE LIBRE](#). SENSOR FREESTYLE LIBRE SŁUŻY DO BEZBOLESNEGO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY W DOWOLNYM CZASIE I MIEJSCU. **PAMIĘTAJ ABY DZIAŁANIE SENSORA ROZPOCZYNAĆ TYLKO DEDYKOWANYM CZYTNIKIEM LUB APLIKACJĄ LIBRELINK W TELEFONIE.**

SYSTEM BEZDOTYKOWEGO POMIARU FREESTYLE LIBRE TO PRAWDZIWA WOLNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ DLA OSÓB Z GLIKEMIA! MOŻE BYĆ STOSOWANY OD 4. ROKU ŻYCIA (POD KONTROLĄ OSOBY DOROSŁEJ). TO BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT.

PRZEKONAJ SIĘ – PRZECZYTAJ, NA CZYM TO POLEGA

ABY MÓC UŻYTKOWAĆ SYSTEM, POTRZEBUJESZ:

1. **SENSORA** – TO MAŁY I LEKKI (3,5 ŚREDNICY, 0,5 CM GRUBOŚCI, 5 G WAGI) KRAŻEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KTÓRY APLIKUJE SIĘ NA SKÓRĘ (MOŻNA TEŻ ZABEZPIECZYĆ GO [OPASKĄ](#), OKLEIĆ SPECJALNYM [PLASTREM](#) ITP.). UMIESZCZONY NA SKÓRZE W DOWOLNYM MIEJSCU (NIE UTRUDNIA NOSZENIA UBRAŃ, NIE RZUCA SIĘ W OCZY) SPRAWDZA STĘŻENIE GLUKOZY W DOWOLNYM CZASIE I W DOWOLNYM MIEJSCU – BEZBOLEŚNIE, BO POPRZECZ SKANOWANIE. JEGO DZIAŁANIE ZAPEWNIĄ BATERIA NA BAZIE TLENKU SREBRA, A SAM SENSOR MA **ŻYWOTNOŚĆ DO 14 DNI**;
2. **CZYTNIKA** – TO MAŁE (9,5X6 CM) ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM, KTÓRE WYPOSAŻONE JEST W PAMIĘĆ UMOŻLIWIĄJĄCĄ ZACHOWANIE I ANALIZĘ DANYCH Z 90 DNI (JEST TO DODATKOWY

PRODUKT, WIĘCEJ INFORMACJI O [CZYTNIKU FREESTYLE LIBRE](#)), KOMUNIKUJE SIĘ Z SENSOREM BEZPRZEWODOWO POPRZECZ SKANOWANIE NFC – ODCZYTUJE DANE Z ODLEGŁOŚCI DO 4 CM. NA JEGO EKRANIE PREZENTOWANE SĄ ZROZUMIAŁE WYKRESY Z KRÓTKIM PODSUMOWANIEM HISTORII STĘŻEŃ GLUKOZY.

UWAGA: CZYTNIK MOŻESZ ZASTĄPIĆ SWOIM SMARTFONEM KTÓRY POSIADA MODUŁ NFC ORAZ SYSTEM ANDROID (MINIMUM 5.0) LUB IOS APPLE.



ZALETY STOSOWANIA FREESTYLE LIBRE

- MINIMALNY CZAS POMIARU – WYSTARCZA 1 SEKUNDA (!), BY NA CZYTNIKU POJAWIŁO SIĘ AKTUALNE STĘŻENIE GLUKOZY ORAZ STRZAŁKA TRENDU WSKAZUJĄCA KIERUNEK ZMIAN STĘŻENIA GLUKOZY.
- ODCZYTY Z WYKRESAMI – ODCZYTY NALEŻY ROBIĆ PRZYNAJMNIEJ RAZ NA OSIEM GODZIN. WÓWCZAS NA CZYTNIKU DOSTĘPNY JEST OŚMIOGODZINNY WYKRES GLIKEMII. BEZPRZEWODOWY CZYTNIK MA WYTRZYMAŁĄ BATERIĘ (WYMAGAJĄCĄ ŁADOWANIA ŚREDNIO RAZ W TYGODNIU).
- BEZPIECZEŃSTWO – SENSOR PRZYLEGA TYLKO DO SKÓRY, SAM WYBIERASZ DOGODNE DLA CIEBIE W DANYM CZASIE MIEJSCE. MOŻESZ DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ SENSOR – [PLASTREM](#) (Z MODNYM NADRUKIEM, W DOWOLNYM STYLU!) LUB WŁOŻYĆ GO W ŁADNĄ OPASKĘ MOCUJĄCĄ.
- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI – NAWET DLA DZIECKA. PORADZI SOBIE Z SENSOREM I CAŁYM SYSTEMEM NA WYJAZDACH.
- DYSKRECJA – SENSOR JEST MAŁY I DYSKRETNY, NIE TRZEBA GO UWIDACZNIĄĆ, ALE MOŻNA GO DOPOSAŻYĆ [AKCESORIAMI](#): NAKLEJKAMI, OPASKAMI MOCUJĄCYMI CZY PLASTRAMI (POMYSŁ NA POPRAWĘ NASTROJU LUB NA PREZENT DLA DIABETYKA).
- TRWAŁOŚĆ – SENSOR PRZYLEGA DO SKÓRY I DZIAŁA PRZEZ MAKSYMALNIE 14 DNI
- WYGODA I SWOBODA – UMOŻLIWIA POMIARY W KAŻDEJ SYTUACJI BEZ DODATKOWEGO OPRZYRZĄDOWANIA CZY SPEŁNIENIA WARUNKÓW HIGIENICZNYCH.
- WODOODPORNOŚĆ – 1 M PRZEZ 30 MINUT, WIĘC NIESTRASZNE MU NIE TYLKO ZABIEGI HIGIENICZNE, ALE I PŁYWANIE W BASENIE, WYSIŁEK FIZYCZNY ITD.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE SYSTEM MONITOROWANIA GLIKEMII FREESTYLE LIBRE JEST PRZEZNACZONY DO KONTROLOWANIA STĘŻENIA GLUKOZY W PŁYNIE ŚRÓDTKANKOWYM U OSÓB CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ **JUŻ OD 4. ROKU ŻYCIA** (OCZYWIŚCIE DO CZASU OSIĄGNIĘCIA PEŁNOLETNOŚCI POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ).

SPRZEDAWANE OPAKOWANIE SENSORA ZAWIERA:

- 1 APLIKATOR CZUJNIKA
- 1 ZESTAW CZUJNIKA
- 1 WACIK NASĄCZONY ALKOHOLEM DO DEZYNFEKЦИИ SKÓRY
- ULOTKĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU

SENSORY Z RACJI NA KONIECZNE ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIH WARUNKÓW TRANSPORTU WYSYŁAMY TYLKO KURIEREM DPD.

PRODUKT OBJĘTY GWARANCJĄ.

DO SENSORÓW FREESTYLE LIBRE POLECAMY TAKŻE DODATKOWE **NAKŁADKI NA SENSOR FREESTYLE LIBRE: [BUBBLE](#) LUB [MIAOMIAO2](#)** DZIĘKI NIM STWORZYSZ SWÓJ WŁASNY SYSTEM CGM A POMIARY CUKRU BĘDĄ WYSWIETLAŁY SIĘ W TWOIM TELEFONIE BEZ KONIECZNOŚCI RĘCZNEGO SKANOWANIA!

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z SENSOREM MOŻESZ ŁATWO ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ PRZEZ NASZ SERWIS. PROCEDURA REKLAMACJI SENSORA WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

1. REKLAMACJE NALEŻY ZGŁOSIĆ W CIĄGU 14 DNI OD WYSTĄPIENIA USTERKI. REKLAMACJĘ NALEŻY WYSYLAĆ NA ADRES MAILOWY: SERWIS@SUGARCUBES.PL

W OCZEKIWANIU NA ODPOWIEDŹ PROSIMY NIE WYRZUCAĆ WADLIWYCH SENSORÓW, ABY W RAZIE POTRZEB MOŻLIWE BYŁO PRZEKAZANIE DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT SENSORA NP. DODATKOWE ZDJĘCIA ITP.

2. JEŚLI REKLAMACJA DOTYCZY BŁĘDNYCH POMIARÓW LUB ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA SENSORA PRZED CZASEM PODAJEMY NASTĘPUJĄCE DANE:

- WIEK UŻYTKOWNIKA

- NUMER SERYJNY SENSORA I CZYJNIKA (OSOBY UŻYWAJĄCE ZAMIAST CZYJNIKA APLIKACJI LIBRELINK PROSZONE SĄ O

PODANIE NUMERU WERSJI UŻYWANEJ APLIKACJI ORAZ MODELU TELEFONU)

- DATA ZAŁOŻENIA SENSORA, DATA WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
- PRZY DUŻYCH RÓŻNICACH W POMIARACH (>60MG) DOKONUJEMY POMIAR Z KRWI PRZY UŻYCIU PASKÓW DO CZYTNIKA FREESTYLE LIBRE I PO 10 MINUTACH SPRAWDZAMY POMIAR CZYTNIKIEM - DOKONUJEMY TRZECH TAKICH POMIARÓW. PRZY ZGŁOSZENIU PODAJEMY TAKŻE NUMERY LOT UŻYTYCH PASKÓW.
- PODAJEMY KODY KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW DOSTĘPNE W DZIENNIKU ZDARZEŃ ZARÓWNO W CZYTNIKU JAK I APLIKACJI NA TEMAT / DZIENNIK ZDARZEŃ WRAZ Z GODZINĄ ICH WYSTĄPIENIA (KODY 3 CYFROWE Z DZIENNIKA ZDARZEŃ W APLIKACJI ORAZ CYFROWO-LITEROWE W DZIENNIKU ZDARZEŃ CZYTNIKA)

3. JEŚLI REKLAMACJA DOTYCZY ODKLEJENIA SIĘ SENSORA I ODPADNIĘCIA, PRZESYŁAMY:

- NUMER SERYJNY SENSORA I CZYTNIKA
- WIEK UŻYTKOWNIA I MIEJSCE ZAŁOŻENIA
- DATA ZAŁOŻENIA SENSORA I DATA ODPADNIĘCIA
- INFORMACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ, ŻE SENSOR NIE PRZEBYWAŁ W WODZIE DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ GODZINY

TYLKO NA PODSTAWIE DOKŁADNYCH POWYŻSZYCH INFORMACJI PROCEDURA REKLAMACJI BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ PRZYJĘTA PRZEZ PRODUCENTA. CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI WYNOŚI DO 14 DNI.